

# JAUNUMS



## Indikācijas un lietošana:

- pēc zobu ekstrakcijas;
- mīksto audu brūces;
- kustīgu gļotādu un mēles fiksācijai;
- pie hroniskām čūlām mutes dobumā;
- pie FGG smaganu transplātācijas;
- pirms pagaidu protezēšanas;
- implantoloģijā;
- ortodontijā.

## Īpašības un priekšrocības:

- eigenolu nesaturošs, intraorāls aizsargājošs pārsējs, ko lieto tieši uz brūces;
- uzlabota intraorālās pārsiešanas koncepcija;
- aizsargā brūces no pārtikas, baktērijām un cigarešu dūmiem;
- palīdz hemostāzei;
- aizsargā šuvju diegu no mēles kairinājuma;
- aizsargā kaulu tranplantātus un membrānas;
- spēcīga adhēzija ar siekalām, izmantojot hidrofilo polimēru;
- samazina sāpes, kairinājumu un jūtīgumu;
- drošs un viegli lietojams;
- viegli sagriezt - dažādas formas un izmēri;
- pašlīmējošs ar siekalām;
- piparmētru garša samazina halitozi;
- satur E vitamīnu.

## Lietošana:

- apskalot brūci ar sterilu vai fizioloģisko šķīdumu;
- izgriezt Ora-Aid pareizā formā un izmērā;
- nedaudz noņemt mitrumu ar marli no brūces;
- pārmērīga eksudācija var samazināt tā adhezīvu izturību un lietošanas laiku;
- noņemt caurspīdīgo aizsargpapīru un uzklāt pārsēju uz brūces;
- uzmanīgi piespiest Ora-Aid 5-10 sekundes, kamēr Ora-Aid pielīp pie brūces;
- atbilstoši apstākļiem var piespiest atkārtoti.

## Izmēri un cenas:

- 25 x 15 mm - iepakojumā 20 gab., cena **42,35 EUR ar PVN**
- 50 x 15 mm - iepakojumā 20 gab., cena **56,87 EUR ar PVN**



**Implantoloģija**



**Ķirurgija**



**Periodontoloģija**



**Ekstrakcija**



**Breketes**



**Stomatīts**



**Mutes čūlas**



**Kairinātāji**